

X3 Wi-Fi otoskop pro čištění uší

Uživatelský manuál

Propojení s mobilním telefonem

Krok 1: Stažení aplikace Suear

iOS: Vyhledejte a stáhněte aplikaci z Apple Store. Android: Vyhledejte a stáhněte aplikaci z Google Play.

Případně naskenujte, vyhledejte a stáhněte aplikaci z níže uvedeného QR kódu.



Kompatibilita

Android 4.4, iOS 9.0 a vyšší verze. Telefony s Androidem: Samsung S7, Galaxy S6 edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel XL, Pixel 3, Nexus 6P, Huawei Mate 9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus, atd. Telefony s iOS: iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, atd.

Poznámka: zařízení není kompatibilní s počítačovým systémem/počítačem.

Krok 2: Spojení


1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 5 s a zařízení zapněte.



2. Otevřete aplikaci Suear, stiskněte ikonku spojení (go to connect). Následujte instrukce a zařízení spojte. Poté přejděte do nastavení Wi-Fi připojení.



3. V nastavení Wi-Fi vyhledejte zařízení „Suear-XXXX“ a zařízení připojte.

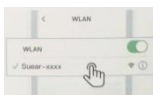

4. Ve chvíli, kdy na displeji telefonu bude zobrazeno, že je zařízení připojené, přejděte do aplikace a klikněte na ikonu „Domečku/Domů“.



Po spojení, budou zobrazeny hlášky:



iOS: „Suear“ vyžaduje připojení v místní síti – potvrďte.

Android: Pokud se zobrazí následující hlášky – bez datového připojení (hláška ohledně pokračování ve snaze připojení, zachování připojení, přepnout Wi-Fi). Stiskněte: keep/connect/decline option



Popis

1. Stav připojení
2. Menu
3. Použit úvodní video
4. Odhadovaná doba
5. Stav baterie
6. Vstup do vizuálního rozhraní

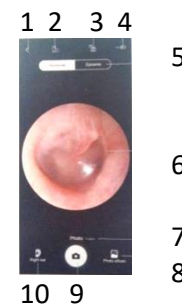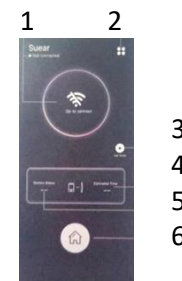

1. Zpět na hlavní stránku
2. Změna mezi krajinou/portrétem
3. Uzamknutí/odemknutí
4. Stav napájení
5. Změna mezi režimem objektivu
6. Hledáček
7. Změna mezi fotografií/videem
8. Album fotografií
9. Zachytit fotku/nahrát video
10. Změna levé/pravé ucho

Příslušenství



Kovový nástavec upevníte otáčením



Silikonový nástavec lze vyměnit, jednoduše nasuňte a vysuňte



6x vyměnitelné tvarově odlišné silikonové nástavce

Upozornění

1. Endoskop slouží k odstranění ušního mazu a k prozkoumání stavu bubínku. Nepoužívejte zařízení k jinému účelu. Výrobce/prodejce neručí/nese zodpovědnost za vniklé škody nebo újmy na zdraví.
2. Před použitím/po použití nástavce otřete alkoholem.
3. Při vkládání nástavce do ucha, buďte opatrní (vkládejte pomalu a opatrně). Jinak hrozí riziko poškození sluchu. Během používání, sedněte v klidu. Nepohybujte prudce hlavou. Nezavádějte endoskop ve zvukovodu příliš daleko. Zařízení není náhrada za odborného lékaře. Při bolestech ucha, problémech se sluchem nebo jiných obtížích ihned vyhledejte lékařkou péči/lékaře.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení není hračka.
5. Endoskop smí používat pouze dospělé osoby, které si důkladně přečetli uvedený manuál. Zamezte během používání kontaktu s jinou osobou.
6. Endoskop používejte pouze při pokojové teplotě. Nevystavujte/nepoužívejte zařízení extrémním teplotám, prašnému prostředí a vysoké vlhkosti. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
7. Pokud bude zařízení vykazovat nějaké abnormality, přestaňte zařízení ihned používat. Jinak hrozí riziko poranění. Kontaktujte prosím servisní pracoviště/prodejce.
8. Zařízení nevkládejte do vody, ani jiných korozivních kapalin. Otírejte ho

pouze suchým, případně vlhkým hadříkem (utřete do sucha).

9. Zařízení nabíjete pomocí síťového adaptéru. Použijte příložený USB kabel. Během nabíjení LED indikátor svítí červeně.

10. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Nevhazujte zařízení do ohně. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo riziko požáru.

Řešení potíží/problémů

Problém	Řešení
Nelze uložit fotku/video do mobilu	Povolte aplikaci přístup k médiím
Zařízení nereaguje	Zařízení nabijte
Aplikace nefunguje	Aplikaci vymažte, znovu stáhněte a nainstalujte.
Záznam v reálném čas není dostupný	<ol style="list-style-type: none">1. Ujistěte se, že je zařízení spojené s telefonem.2. WLAN nemá povolení ke spojení? Povolte WLAN. Pokud jste dali prvně CANCEL, odstraňte původní připojení a proveďte opětovné vyhledání zařízení a připojení.3. Povolte v nastavení telefonu WLAN nebo WLAN and Cellular Data.4. Vypněte a znovu zapněte mobilní data.
Zařízení svítí červeně	Nabijte zařízení
Přerušeno Wi-Fi spojení	Restartujte zařízení, otevřete aplikaci a znovu zařízení připojte na Wi-Fi.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz